



MedicalTec

JIANGSU YUWELL MEDICAL EQUIPMENT & SUPPLY CO., LTD. Sales
Center Address: Huanyuan East Road No.1, Xuzhuang Software Park,
Nanjing, Jiangsu Province, P.R. China, 210000
Manufacturer Address: YunYang Industrial Park, DanYang, Jiangsu
Province, P.R. China, 212300
<http://www.yuwell.com>
Revision date: November 2020

1430134-0A



yuwell

Medidor de Glucómetro

Medidor de Glucómetro

Modelo de especificación: 582

Manual de usuario



Lea atentamente las instrucciones de funcionamiento!
Ver certificación de calidad o empaque para la fecha de producción



Bienvenido a usar el Glucómetro de la serie Yuwell

Ámbito de aplicación: El Glucómetro se combina con la tira reactiva de glucosa en sangre Yuyue producida por Jiangsu Yuyue Medical Equipment Co., Ltd. Se utiliza para medir la concentración de glucosa en sangre entera capilar en hospitales y hogares.

Para obtener información importante, lea estas instrucciones en detalle para garantizar un uso seguro y una detección precisa.

Antes de usar este producto, lea estas instrucciones en detalle para garantizar un uso seguro y una detección precisa. Nota:

- Este producto solo se usa para pruebas de glucosa en sangre y solo se puede usar para analizar los niveles de glucosa en sangre en sangre entera capilar fresco de la yema del dedo. No se puede utilizar para la determinación de plasma y suero.

- Sin contraindicaciones.
- Este producto no se puede utilizar para el diagnóstico de diabetes o pruebas rápidas de glucosa en sangre en recién nacidos.
- Este producto no se puede utilizar para ninguna otra prueba que no sea la prueba de glucosa en sangre.
- Los usuarios previstos de este producto incluyen personal médico profesional y personas no profesionales.
- El plan de tratamiento no se puede cambiar en función de los resultados de la prueba sin consultar al médico o al experto en diabetes.
- Utilice el medidor de la manera especificada por Yuwell, o la protección proporcionada por el medidor puede verse afectada.

Para utilizar este medidor de glucosa correctamente para el cuidado diario de pacientes diabéticos, consulte a su médico o especialista en diabetes.

- Compruebe si el embalaje del medidor está completo y si está dañado debido al transporte.
- Si tiene alguna pregunta sobre el uso de los medidores de glucosa en sangre Yuwell, póngase en contacto con el distribuidor local.
- El Glucómetro Yuwell proporciona un reemplazo dentro de los 5 años y un servicio de garantía de por vida. Complete su información válida en nuestra tarjeta de garantía y devuélvala a las farmacias vendedoras, distribuidores o Yuwell, se convertirá en miembro de Yuwell Healthy Home para disfrutar de servicios completos.

Capítulo 1: Descripción general del sistema Descripción

Uso previsto.....01

Tira de prueba de glucosa en sangre.....05

Capítulo 2: Preparación para el uso del medidor de glucosa en sangre

Instalación de la batería.....06

Configuración de modo.....07

Capítulo 3: Medición de glucosa en sangre

Uso de pluma de muestreo de sangre.....10

Preparación del medidor y la tira reactiva de glucosa en sangre.....14

Medición de glucosa en sangre.....16

Capítulo 4: Función de memoria	
Mostrar datos.....	18
Verificar datos.....	18
Borrar datos.....	20
Capítulo 5: Detección de control de calidad y configuración de iconos	
Detección de control de calidad.....	22
Configuración del icono de líquido de calidad controlada.....	23
Capítulo 6: Almacenamiento y mantenimiento	
Almacenamiento y mantenimiento.....	24
Capítulo 7: Parámetros técnicos y estándares de referencia	
Parámetros técnicos.....	26
Estándares de referencia.....	29

Capítulo 8: Tiempo de automonitorización , frecuencia de seguimiento y objetivos de control de la glucosa en sangre	
Tiempo de automonitorización de la glucosa en sangre.....	30
Autocontrol de la frecuencia de glucosa en sangre.....	31
Objetivos de control de la glucosa en sangre.....	32
Capítulo9: Otra información Precauciones.....	33
Los símbolos y significados de los requisitos de seguridad.....	35
Problemas comunes y métodos de eliminación.....	36


Descripción

Composición de empaque: Glucómetro yuwell 582, dos pilas AAA, manual del usuario y un dispositivo de punción (pluma).


Uso previsto

El Glucómetro Yuwell 582 está diseñado para su uso en la medición cuantitativa de glucosa en sangre entera humana extraída de la yema del dedo (capilar). Está destinado a ser utilizado por personas no profesionales o en centros clínicos por parte del personal médico. Este sistema es solo para uso diagnóstico in vitro.

El Glucómetro Yuwell 582 solo se puede utilizar con la tira reactiva de glucosa en sangre Yuwell. Líquido de calidad controlada de glucosa en sangre Yuwell se usa con el Glucómetro Yuwell 582 y la tira reactiva para comprobar que el medidor y la tira reactiva funcionan correctamente. Una prueba de control también le ayuda a practicar la técnica de prueba adecuada.

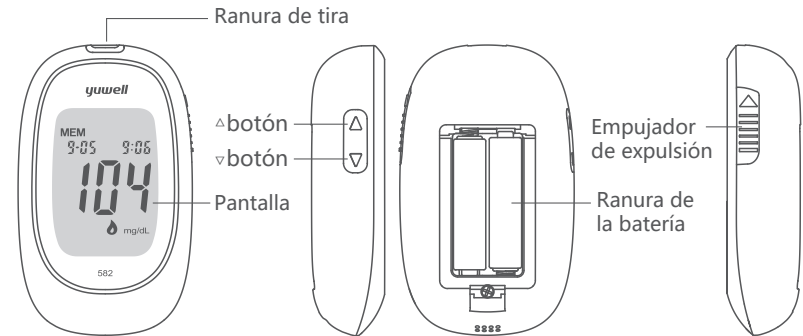

Visualización de pantalla completa: el glucómetro mostrará el siguiente contenido después del inicio

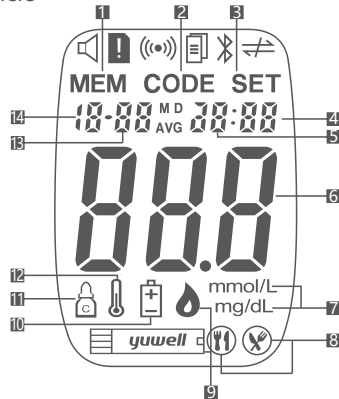


- | | |
|--|---|
| 1. Resultados de almacenamiento | 9. Icono de tira y sangre: agregue sangre o control a la tira |
| 2. Código de corrección | 10. Icono de batería baja |
| 3. En el modo de ajuste | 11. Icono de líquido de calidad controlada |
| 4. Minuto | 12. Icono de temperatura |
| 5. Horas | 13. Fecha |
| 6. Valor de prueba | 14. Mes |
| 7. Unidad de medición | |
| 8. Iconos antes y después de las comidas | |

Nota: La unidad de medida está determinada como mg/dL o mmol/L antes de producción, el usuario no la puede cambiar.

Tiras reactivas

Este producto utiliza un principio electroquímico. La tira reactiva de glucosa en sangre se inserta en el medidor de glucómetro. Cuando las gotas de sangre entren en contacto con el puerto de entrada de sangre de la tira reactiva del glucómetro, la sangre se desviará automáticamente hacia la zona de reacción. La glucosa oxidasa cataliza la reacción redox del glucómetro, lo que da como resultado una microcorriente, y el valor de concentración de glucosa (mmol/L o mg/dL) se calcula y se muestra en el medidor de glucosa en sangre, y luego se almacena.


Nota: compre tiras reactivas de sangre Yuwell y un lápiz de muestra de sangre, que deben utilizarse con el medidor de glucosa en sangre.

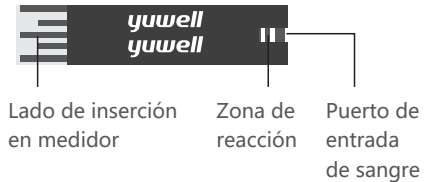

Instalación de la batería

Abra la tapa trasera de la batería.

1. Presione el resorte con el polo negativo de la batería, inserte la batería e instale la tapa trasera de la batería.
2. Presione el polo positivo de la batería con la uña y podrá quitar la batería.

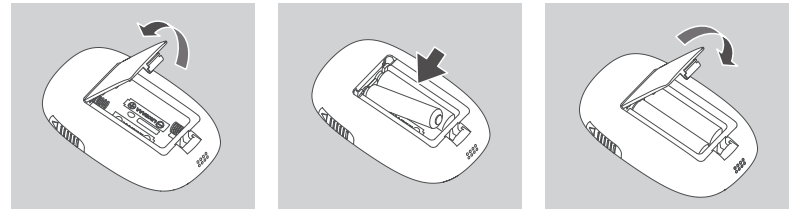

Nota: el tabique de la batería debe retirarse cuando utilice este producto por primera vez.

Configuración de modo

Entrar en la configuración del modo

1. Entre cuando la batería esté recién instalada o reemplazada
2. Presione el botón ▽ durante 3 segundos para entrar a la configuración de modo en el estado de apagado.



Ajuste de fecha y hora

1. El año parpadea, presione el botón ▲ para configurar el año (esta unidad solo muestra los dos últimos dígitos del año, es decir, 20 = 2020), presione el botón ▽ para confirmar el año y cambiar a la configuración del mes.
2. El mes parpadea, presione el botón ▲ para configurar el mes, presione ▽ para confirmar el mes y cambiar al ajuste de la fecha.
3. La fecha parpadea, presione el botón ▲ para configurar la fecha, presión el botón ▽ para confirmar la fecha y cambiar al ajuste de la hora.
4. La hora parpadea, presione el botón ▲ para configurar la hora (este dispositivo utiliza un sistema de 24 horas), presione el botón ▽ para confirmar la hora y cambiar al ajuste de los minutos.
5. El minuto parpadea, presione el botón ▲ para configurar el minuto, presione el botón, el minuto se configura y cambia al modo de reloj.

6. Si no se realiza ninguna operación en el glucómetro en el estado de configuración en 3 minutos, se apagará automáticamente.



Ajuste del año



Ajuste del mes



Ajuste del fecha




Ajuste del hora




Ajuste del
minuto

Uso de pluma de extracción de sangre


1. Desenroscar la tapa de la pluma de muestra de sangre. (O cubierta protectora transparente).
2. Coloque la lanceta y empújela hasta el fondo del soporte del dispositivo de punción (pluma).
3. Gire la tapa protectora de la lanceta (no la agite para evitar que la aguja se doble). No tire nunca la tapa protectora (consulte el procedimiento 9: Instrucciones de procesamiento después de la extracción de sangre).

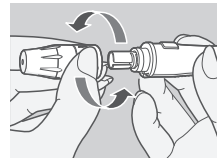

1

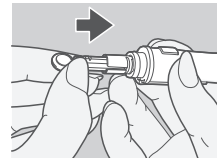


2

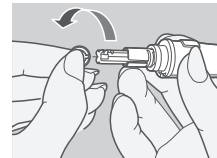


3


4. Vuelva a enroscar la tapa del dispositivo de punción (pluma).
5. Ajuste la profundidad de la extracción de sangre. Profundidad recomendada: "2", los usuarios con piel más gruesa pueden recolectar más profundo adecuadamente.
6. Tire el asa de la pluma de extracción de sangre hacia atrás y déjela que se abra después de escuchar el "clic" o de que no pudiera tirarla. En este momento, el dispositivo de punción (pluma) está listo. (Extraiga sangre inmediatamente cuando el medidor esté listo y solicite la extracción de sangre).

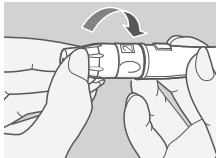

4

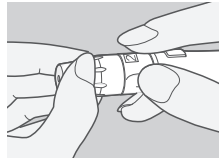


5

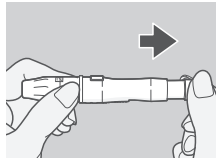

6

7. Coloque la parte superior del dispositivo de punción (pluma) preparada en la parte donde se recolectará la sangre, luego presione el botón de expulsión para recolectar la sangre. Retire la pluma de extracción de sangre después de completar la extracción de sangre.
8. Al extraer sangre de la yema del dedo, se recomienda limpiar la primera gota de sangre y usar la segunda gota.

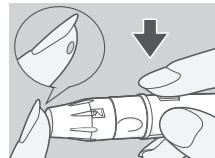

7




8

Antes de sacar muestra de sangre, lávese las manos con agua tibia y jabón y séquelas bien.

9. Deseche adecuadamente las lancetas usadas:

Desenrosque la tapa de ajuste de la pluma de muestreo de sangre y cubra la punta de la lanceta usada con una tapa protectora para evitar que la punta de la lanceta quede expuesta. Empuje la varilla de empuje de descarga adelante y coloque la lanceta usada en un contenedor de residuos.


Nota: dispositivo de punción (pluma) está limitada a una persona y no puede ser utilizada por varias personas. La lanceta es para un solo uso, no la reutilice.

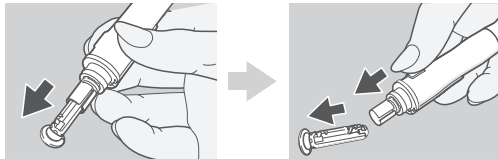

9

Preparación del medidor y la tira reactiva de glucómetro


1. Inserte la tira reactiva en la ranura del glucómetro y empuje la tira reactiva hasta el final. (Marcas registradas hacia arriba, rayas negras hacia adentro)
2. Después de escuchar el pitido (si el glucómetro tiene un zumbador), el glucómetro se enciende automáticamente y muestra el código. Verifique si el código del frasco de tiras reactivas coincide con el código que se muestra en el medidor de glucosa en sangre. (Nota: cuando los dos códigos no estén unánimes, pruebe con otra tira reactiva nueva. Si los códigos

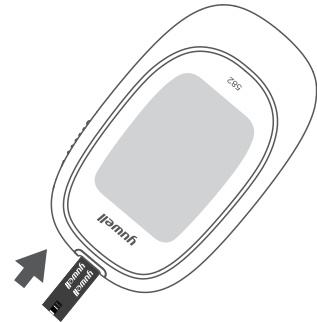

siguen siendo distintos, comuníquese con el personal de servicio al cliente de Yuwell).


3. Cuando el símbolo de disminución de sangre  en la pantalla parpadea, indica que se está recolectando sangre. En este momento, la fecha, la hora y el código de calibración parpadean alternativamente en la pantalla. Configure el líquido de calidad controlada antes y después de las comidas presionando el botón ▽.

Nota: el proceso de detección debe completarse en 3 minutos. El medidor se apagará automáticamente sin funcionar en 3 minutos.

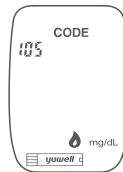


Medición de glucosa en sangre



1. Toque ligeramente el puerto de entrada de sangre con la muestra de sangre y las gotas de sangre se succionarán automáticamente. No gotee sangre en la tira reactiva.

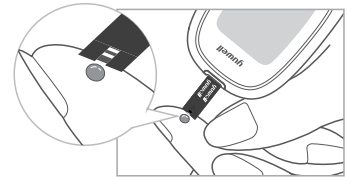

2. Confirme si el volumen de sangre está suficiente. Podemos observar que el color de toda la reacción de la tira reactiva se vuelve más oscuro.

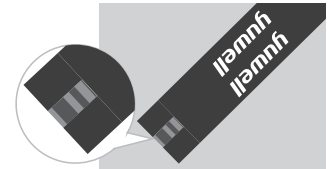

3. La pantalla muestra los resultados de la medición de glucosa en sangre durante 8 segundos. No agite el instrumento durante la medición y la cuenta atrás.

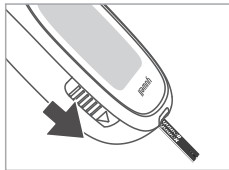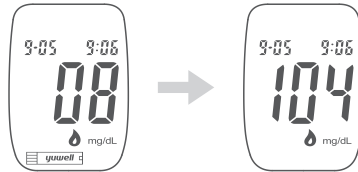


4. Después de obtener los resultados de la medición, presione el pulsador de expulsión para expulsar la tira reactiva. El medidor almacenará automáticamente los resultados de la medición y se apagará.

Mostrar datos

En el estado apagado, presione el botón Δ , la pantalla muestra los últimos resultados de la medición. Presione el botón Δ nuevamente para mostrar todos los resultados de la medición en secuencia. El Glucómetro se apaga automáticamente después de 15 segundos sin operación.

Verificar datos

- Verifique los promedios de las mediciones de los últimos 7 días, 14 días, 30 días, 2 meses y 3 meses.
- Mantenga presionada el botón Δ durante 3 segundos en el estado apagado para mostrar el promedio de glucosa en sangre durante 7 días.

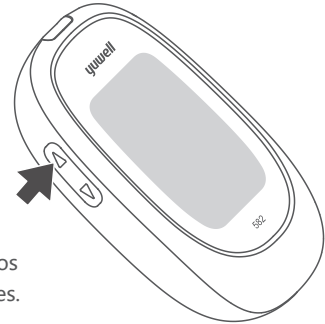


Presione el botón Δ nuevamente para mostrar el promedio de glucosa en sangre durante 14 días, 30 días, 2 meses, 3 meses, 7 días antes de las comidas, 14 días antes de las comidas, 30 días antes de las comidas, 2 meses antes de las comidas, 3 meses antes de las comidas, 7 días después de las comidas, 14 días después de las comidas, 30 días después de las comidas, 2 meses después de las comidas y 3 meses después de las comidas. El Glucómetro se apaga automáticamente después de 15 segundos sin operación.




Borrar datos (manipular con cuidado)

Eliminación de todo el grupo

Presione los dos botones Δ ∇ juntas durante 3 segundos durante el estado de apagado o en el estado de verificación de memoria, aparecerá el icono "dEL" y los datos del grupo de memoria actual parpadearán en la esquina superior derecha. Presione el botón ∇ en este punto y presione nuevamente. El número de grupos de memoria cambia a 0, lo que indica que se ha borrado toda la memoria.

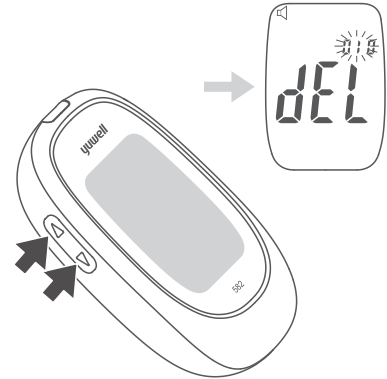

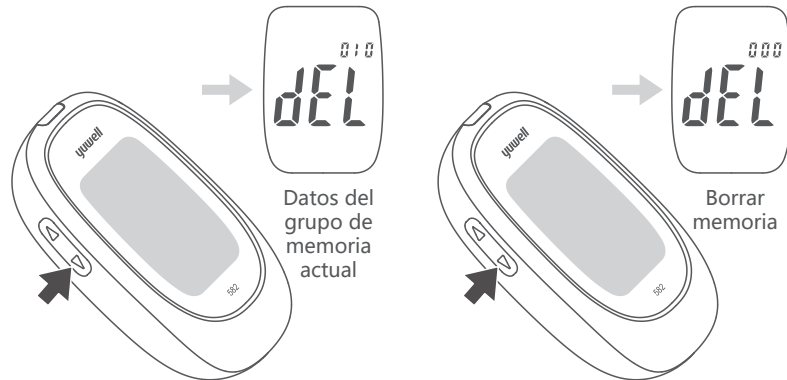

Detección de control de calidad

Si desea saber si el sistema operativo de su glucómetro funciona correctamente, realice una detección de control de calidad en su medidor de glucosa en sangre.

Nota: Está prohibido utilizar una solución de control caducada. El desecho de medidores, tiras reactivas de glucosa en sangre, lancetas, baterías y sus accesorios deben cumplir con las leyes y regulaciones nacionales.

Configuración del icono de líquido de calidad controlada

1. Utilice la detección de líquido de calidad controlada. Después de la inserción, presione el botón ▾ para mostrar el icono antes de la comida, y presione el botón ▾ nuevamente para mostrar el icono después de la comida.
2. Presione el botón ▾ nuevamente para mostrar el icono  de líquido de calidad controlada. En este punto se realiza una prueba de líquido de calidad controlada.
3. Reemplace la gota de sangre con solución de control y consulte "Medición de glucosa en sangre".



Almacenamiento y mantenimiento

- Use un detergente no tóxico y agua tibia para limpiar el cabezal de ajuste del dispositivo de punción (pluma) y séquelo completamente después de limpiarlo. También se puede desinfectar con alcohol medicinal.
- Para el almacenamiento de la tira reactiva de glucosa en sangre, consulte las instrucciones de la tira reactiva.
- Retire la batería cuando el Glucómetro no se use durante un período de tiempo prolongado.
- El producto debe almacenarse en un ambiente seco, fresco, no corrosivo y en un lugar bien ventilado.
- Transporte y almacenamiento:
Rango de temperatura ambiente: -10°C ~ +50°C
Rango de humedad relativa: <90%, sin condensación

Rango de presión atmosférica: 500hPa~1060hPa

- Utilice un paño limpio, suave y húmedo para limpiar el medidor, use alcohol 75%, blanqueadores o limpiadores fuertes están prohibidos. Se recomienda desinfectar y limpiar el medidor diariamente para su uso en hospitales y semanalmente para uso personal.
- Las Mediciones de laboratorio deben realizarse con regularidad y los resultados de la prueba del Glucómetro deben compararse con los resultados de laboratorio.
- El mantenimiento de este producto está a cargo del centro de atención al cliente. No golpee ni desmonte el medidor.
- Si ocurre un accidente durante el uso de este producto, llame a la línea directa de emergencia de inmediato y busque la ayuda de un personal médico profesional.

Parámetros técnicos

Unidad de medida	mmol/L, mg/dL
Rango de medición	1.1 ~ 33.3 mmol/L (20~600mg/dL)
Sangre objetivo	Sangre entera capilar fresca de la yema del dedo
Estándar de calibración	Calibración de plasma
Volumen de sangre	Manual de tiras reactivas de referencia
Hematocrito	30% ~ 60%
Tiempo de prueba	<10s
Memoria	250 grupos
Apagado automático	15 segundos a 3 minutos
Pantalla	LCD
Modo de operación	Operación continua
Fuente	DC 3.0V
Duración de la batería	2 pilas alcalinas AAA con 1000 medidas

Tipo de Equipo	Equipo de suministro de energía interno, equipo no AP/ APG (equipo que no se puede utilizar en presencia de inflamables gases anestésicos mezclados con aire o anestésicos inflamables gases mezclados con oxígeno u óxido nitroso)
Vida de Servicio	5 años (excepto piezas de desgaste)
Seguridad Eléctrica clasificación	Sección de aplicación BF 
Electromagnética interferencia	No se han observado interferencias electromagnéticas con otros dispositivos en este producto, que cumple con las normas internacionales de emisión electromagnética vigentes. Para evitar interferencias electromagnéticas en el entorno de uso y afectar los resultados de la medición, manténgalo alejado de teléfonos móviles, computadoras y otros electrodomésticos mientras mide.

Condiciones normales de trabajo	Rango de temperatura ambiente: 10 °C ~ 40 °C Rango de humedad relativa: <85%
---------------------------------	---

⚠ Nota: La batería seca proporcionada con esta máquina solo se utiliza para realizar pruebas cuando el dispositivo está encendido. Se recomienda reemplazar con la nueva batería para asegurarse de que el glucómetro no funcione sin problema durante la prueba.

Estándares de referencia

● La desviación del resultado entre el sistema de monitoreo de glucosa en sangre y el instrumento bioquímico (laboratorio clínico) está dentro del 95%, que se indicará a continuación:

Precisión:

Rango de prueba	Precisión
≤ 4.2 mmol/L (≤ 75 mg/dL)	Not more than ± 0.83 mmol/L (± 15 mg/dL)
> 4.2 mmol/L (> 75 mg/dL)	Not more than $\pm 20\%$

Precisión:

Rango de prueba	Precisión
< 5.5 mmol/L (< 100 mg/dL)	SD < 0.42 mmol/L (< 7.7 mg/dL)
≥ 5.5 mmol/L (≥ 100 mg/dL)	CV $< 7.5\%$

Tiempo de automonitorización de la glucosa en sangre

Los diabéticos necesitan controlar regularmente sus niveles de glucosa en sangre para estar al tanto de los cambios en los niveles de glucosa en sangre. Su médico le informará del tiempo de la prueba de glucosa en sangre y el nivel de control de acuerdo con su situación específica. El siguiente es el tiempo de control de glucosa en sangre recomendado por expertos, ¡solo como referencia!

- Se despierta y aún no se desayuna
- Desayunoo glucosa en sangre
- 1-2 horas después del desayuno
- Antes del almuerzo
- 1-2 horas después del almuerzo
- Antes y después del ejercicio físico
- Antes de la cena
- 1-2 horas después de la cena
- Antes de dormir por la noche
- Después del postre
- 2-3 de la madrugada (si se inyecta insulina)

Frecuencia de automonitorización de la glucosa en sangre

- La glucemia de los pacientes con un control deficiente de la glucemia o de los pacientes críticamente enfermos debe monitorizarse de 5 a 7 veces al día, 3 días a la semana hasta que la condición sea estable y la glucemia esté controlada.
- Cuando la condición es estable o ha alcanzado el objetivo de control de la glucosa en sangre, se puede controlar 2 veces al día, 3 días a la semana.
- La glucosa en sangre de los pacientes bajo terapia con insulina debe controlarse al menos 5 veces al día al comienzo del tratamiento y debe autocontrolarse de 2 a 4 veces al día después de alcanzar el objetivo del tratamiento.
- La glucosa en sangre de los pacientes que administran medicamento por vía oral e intervenciones en el estilo de vida debe controlarse de 2 a 4 veces por semana.

Objetivos de control de la glucosa en sangre

Los diabéticos necesitan controlar regularmente sus niveles de glucosa en sangre para estar al tanto de los cambios en los niveles de glucosa en sangre. Su médico le informará del tiempo de la prueba de glucosa en sangre y el nivel de control de acuerdo con su situación específica. El siguiente es el tiempo de monitoreo de glucosa en sangre recomendado por expertos, ¡solo como referencia!

Estado	Ideal	General	Pobre
Ayuno (mg/dL)	79-110	≤126	>126
Desayunado (mg/dL)	79-144	≤180	>180
Hemoglobina glucosilada (%)	<6.5	6.5-7.5	>7.5

Precauciones

Este producto se utiliza para controlar los niveles de glucosa en sangre de pacientes diabéticos. No se puede utilizar para el diagnóstico y la detección de la diabetes, ni tampoco para la prueba de glucosa relacionada con trastornos del metabolismo de la glucosa.

- Está prohibido utilizar tiras reactivas caducadas, dañadas o contaminadas. La prueba de glucosa en sangre debe realizarse de acuerdo con los procedimientos estándar; de lo contrario, se pueden producir resultados falsos.
- El dispositivo de punción (pluma) solo puede ser utilizado por una persona y no puede ser utilizado por más de una persona. La lanceta es de uso desechable, no la reutilice.
- Evite el contacto con loción, aceite o polvo en el lápiz de muestra de sangre.
- No sumerja el dispositivo de punción (pluma) en ningún líquido.

El resultado de la prueba está entre 1.1 y 33.3 mmol/L. cuando el resultado de la prueba es inferior a 1.1 mmol/L se mostrará: " $\underset{\circ}{L0}$ "

cuando el resultado de la prueba está superior a 33.3 mmol/L, se muestra: " $\underset{\circ}{H!}$ "

Los símbolos y significados de los requisitos de seguridad de esta unidad

Símbolo	Sentido	Símbolo	Sentido
	Hacia arriba		Frágil, manipular con cuidado
	Mantener seco		Símbolo de la gota de sangre
	Marca de control de contaminación de productos de información electrónica, la vida útil de protección del medio ambiente es de 10 años, los consumibles no están incluidos.		Atención, se debe consultar el documento adjunto en todos los casos en los que este símbolo esté marcado

Problemas comunes y métodos de eliminación

Error	Descripción	Solución
	Las tiras reactivas se han contaminado o usado	Reemplácelo
	Error de código de calibración	Vuelva a insertar la tira reactiva y confirme que coincide con la máquina.
	Error del sistema	Haga medición con una nueva tira reactiva de glucosa. Si el problema persiste, póngase en contacto con el distribuidor o el fabricante.
		
	Los resultados de la prueba de glucosa en sangre están más altos que el rango de detección	Indica que puede tener hiperglucemia grave. Siga inmediatamente las instrucciones del médico para la detección o el tratamiento repetidos.

Error	Descripción	Solución
	Los resultados de la prueba de glucosa en sangre están más bajos que el rango de detección	Indica que puede tener hipoglucemia grave. Siga inmediatamente las instrucciones del médico para la medición o buscar tratamiento médico
	La temperatura ambiente está superior a 40 °C	Coloque el medidor debajo de un entorno de 10 °C ~ 40 °C durante 30 minutos antes de usarlo
	La temperatura ambiente está inferior a 10 °C	Coloque el medidor debajo de un entorno de 10 °C ~ 40 °C durante 30 minutos antes de la detección

Error	Descripción	Solución
	La batería no está suficiente y el medidor se apagará automáticamente	Reemplace por baterías nuevas inmediatamente
	Escasez de energía de la batería	Sustituir con batería nueva, por favor

Durante el servicio de garantía, si necesita proporcionar diagramas de circuito, materiales necesarios y cableado eléctrico, comuníquese con su fabricante.

Nota: si no se puede descartar la situación anterior durante el uso o si se produjeron fallas inesperadas, comuníquese con el centro de atención al cliente de Yuwell.

Otros problemas comunes

Problema	Solución
El medidor de glucosa en sangre no prueba después de agregar sangre	1.Confirme si la tira reactiva está completamente insertada en la ranura 2.Compruebe si hay materias extrañas en la tira reactiva. 3.La sangre debe succionarse correctamente por el puerto de entrada de sangre de la tira reactiva. 4.No agregue la muestra de sangre antes de que parpadee el icono de la gota de sangre

Problema	Solución
Resultados de pruebas anormales	1. Compruebe si hay materias extrañas en la tira reactiva. 2. Compruebe si la tira reactiva se encuentra dentro del período de validez. 3. Compruebe si la tira reactiva ha estado expuesta durante mucho tiempo. 4. Confirme si el código de calibración del medidor de glucosa en sangre coincide con el de la tira reactiva. 5. Compruebe si aparece el icono de termómetro en la pantalla del medidor de glucosa en sangre

Problema	Solución
El icono de termómetro aparece en la pantalla del medidor de glucosa	1. El medidor de glucosa en sangre y las tiras reactivas deben colocarse en un ambiente de 10 ° C a 40 ° C y usarse aproximadamente 20 minutos después. 2. Si el icono del termómetro está siempre presente, comuníquese con el personal de servicio al cliente de Yuwell.
La tira reactiva está insertada, pero el medidor no se inicia	1. Confirme si la tira reactiva está completamente insertada en la ranura 2. Confirme si la dirección positiva y negativa de la batería es correcta. 3. Reemplazar con batería nueva

Nota: si no se puede descartar la situación anterior durante el uso o si se produjeron fallas inesperadas, comuníquese con el centro de atención al cliente de Yuwell.

Servicios de valor añadido

Todo lo que necesita hacer es enviar por correo una tarjeta de garantía clara y completa al Centro de servicio al cliente de Yuwell. Una vez que nos hayamos contactado con usted y verificado la información, se convertirá en miembro de Yuwell Healthy Home y disfrutará de una variedad de servicios de valor añadido para nuestros miembros.

Dirección

Yunyang Industrial Park, Danyang City, Jiangsu Province

To: Customer Service Management Center, JIANGSU YUWELL MEDICAL
EQUIPMENT & SUPPLY CO., LTD.

Zip Code: 212300