


Silla de traslado eléctrica

TCM-01H

Manual de uso y cuidado

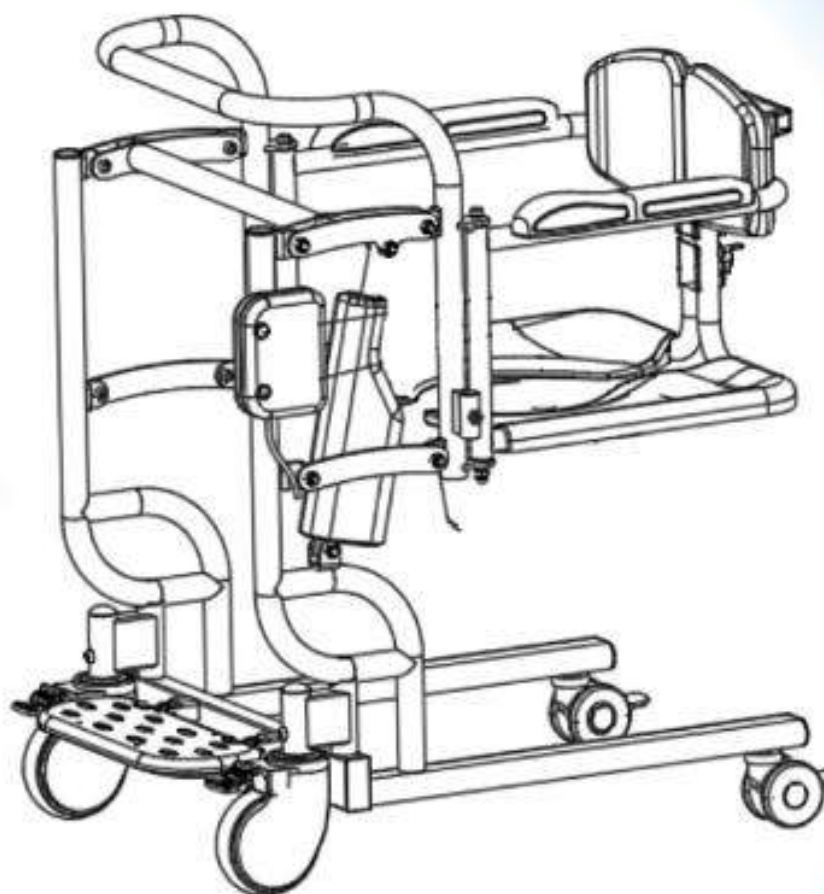

MedicalTec

2024

Dibujos y detalles de los accesorios



(1)



(2)



(3)



(4)



(5)




(6)



(7)



(8)

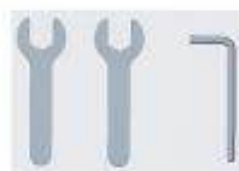


(9)

- (1) Juego de base / 1 unidad
- (2) Juego de tubos de soporten / 1 unidad
- (3) Juego de placa de asiento izquierda / 1 unidad
- (4) Juego de placa de asiento derecha / 1 unidad
- (5) Controlador de batería / 1 unidad
- (6) Tornillo corto / 2 unidades
- (7) Tornillo largo / 2 unidades
- (8) Tuerca de perilla / 1 unidad
- (9) Herramienta de instalación

Instalación

Paso 1:

Inserta el extremo del tubo del respaldo (conjunto 2) en el orificio redondo de la base.
Coloca el conjunto (1) como se muestra en la imagen izquierda.

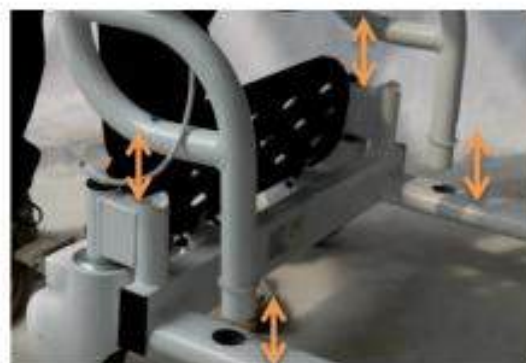

Paso 2:

Inserta los tornillos largos (7) en los orificios para tornillos de la base (1) pasándolos por los orificios curvos del grupo del tubo del respaldo (2), atornillándolos primero hasta la mitad sin fijarlos.

Paso 3:

Pase el tornillo corto (6) a través del orificio en la parte inferior del juego de base (1) y fíjelo en el orificio para tornillos en la boquilla del extremo del grupo del tubo del respaldo, estos dos tornillos se bloquean firmemente con una herramienta.



Paso 4:

Inserta los tornillos largos (7) en los orificios del respaldo (2), fíjalos con una herramienta.

Instalación

Paso 5:

Retire los tornillos del juego de la placa del asiento del lado derecho (4), luego alinee el lado derecho del juego del panel del asiento (4) con el orificio de la oreja de montaje en la parte posterior del grupo del tubo del respaldo, inserte los tornillos retirados de arriba hacia abajo, y use una herramienta para sujetar las cabezas de los tornillos y las tuercas.

¡Apretar fuertemente!

Tenga en cuenta que la tuerca está orientada hacia abajo.



Paso 6:

Retire los tornillos del juego de placas del asiento izquierdo (3), luego alinee el lado izquierdo del juego del panel del asiento (3) con el orificio de la oreja de montaje en la parte posterior del grupo del tubo del respaldo, inserte los tornillos retirados de arriba hacia abajo y use una herramienta para sujetar las cabezas de los tornillos.

Instalación

Paso 7: Instalación del Controlador y Correa Colgante

1. **Alinear:** Coloca la hebilla colgante detrás del controlador de la batería contra el juego de tubos del respaldo (2) en la posición superior izquierda para colgarlo.
2. **Conectar:** Conecta la caja de control del cable con el cable de la barra de empuje enchufado y fijado.
3. **Probar:** Intenta presionar los interruptores arriba/abajo de la caja de control (5) para verificar si puedes controlar el movimiento hacia arriba y hacia abajo.



Paso 8: Aprieta el tornillo del pomo (8) contra la tuerca del soporte antigoteo del lado izquierdo del tubo del soporte (conjunto).

Instrucciones

Abrochador de seguridad del respaldo:

Una vez que el usuario se sienta en el producto, debe abrochar manualmente el abrochador de seguridad del respaldo para garantizar su seguridad.


Abrochador de seguridad del respaldo:

Alinee las bocas izquierda y derecha y ciérrelas.


Presione las hebillas pequeñas en ambos lados para desbloquear.

Después de que el usuario se sienta en el producto, empuje los paneles del asiento izquierdo y derecho juntos para abrir el gancho se puede bloquear automáticamente cuando el gancho está cerrado. ¡Preste atención a la inspección antes de lanzar el producto! Compruebe si la hebilla está en su lugar. Qué gancho: pellizque para bloquear automáticamente

Tire hacia abajo de la manija del gancho del interruptor para liberar el seguro.

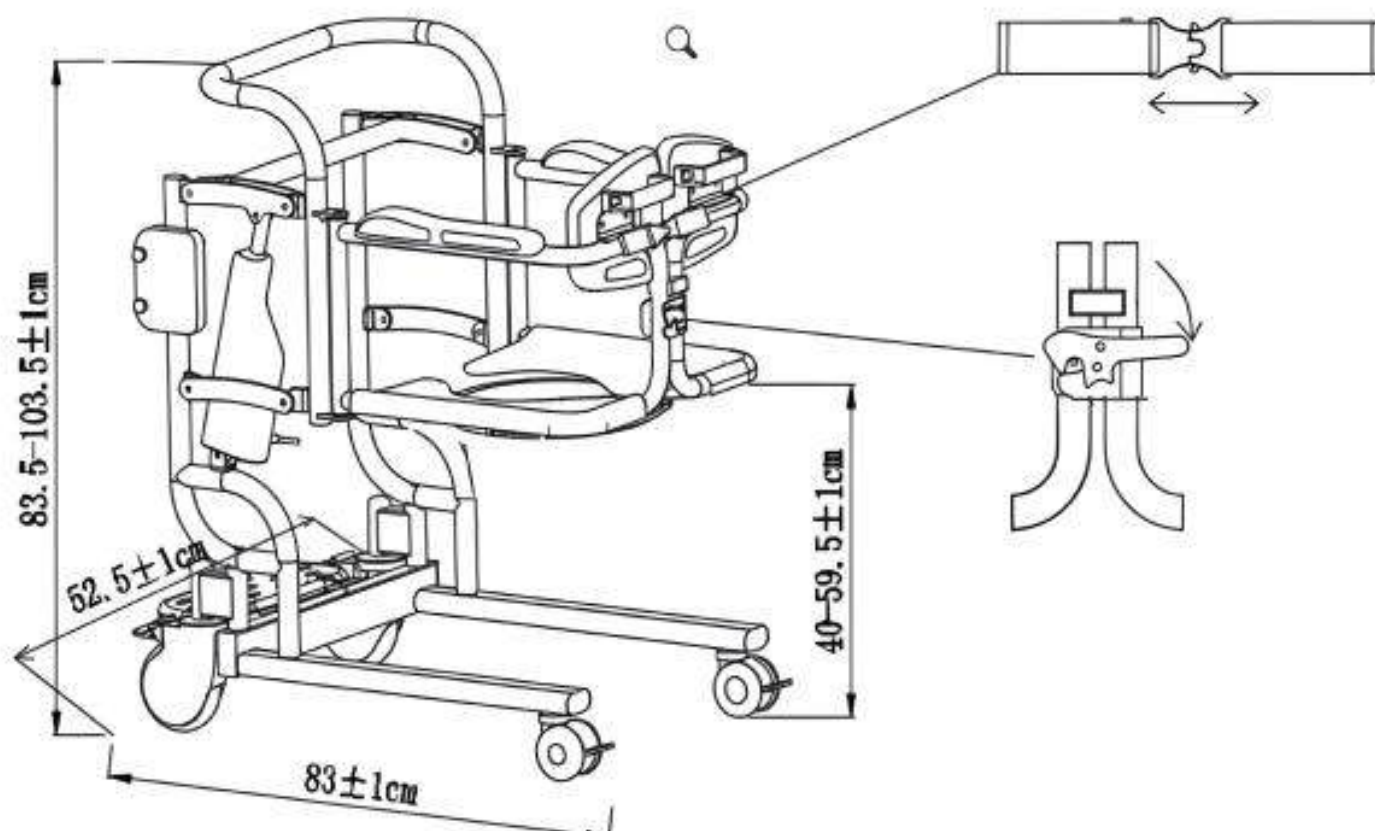


Instrucciones

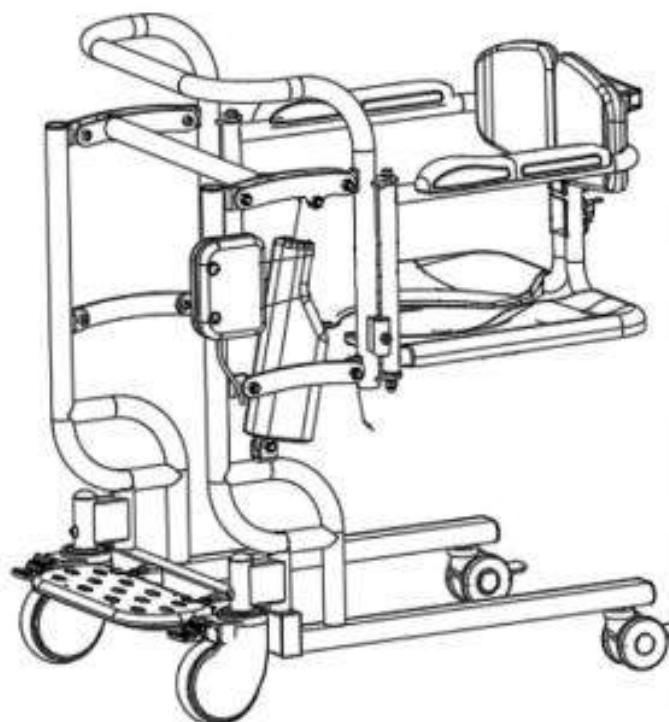

Ajuste de elevación y descenso:

La elevación y descenso adopta una estructura paralela de cuatro enlaces, impulsada por un actuador eléctrico para la elevación y descenso. La elevación y descenso es estable y confiable, la altura de elevación se completa presionando manualmente el interruptor de botón de elevación, y el ajuste de descenso se completa presionando manualmente el botón.

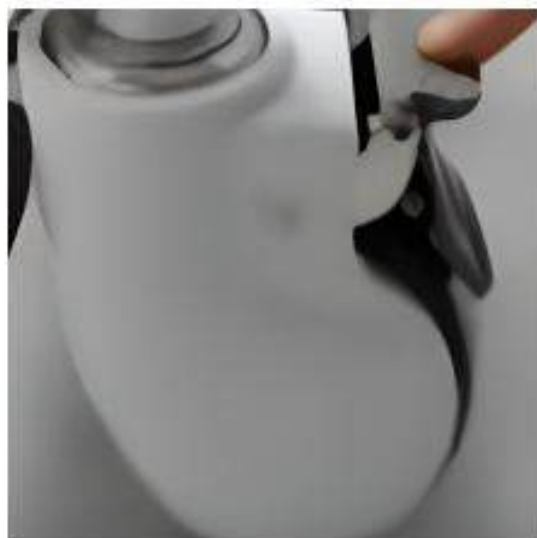

Activar el freno



Libera el freno

Precauciones



- Atención! Este producto debe utilizarse bajo la supervisión de un médico, fisioterapeuta o vendedor especializado.



- ¡Precaución! Verifique que los tornillos estén bien ajustados antes de usar el producto.



- Si los tornillos están sueltos, el soporte podría deformarse permanentemente.




¡Advertencia!

Algunos materiales de este producto se derriten al exponerse al fuego, manténgalo alejado de las llamas.

Aviso: Este producto no es un reemplazo para un producto especial de baño.

Debe transferirse a un producto de baño adecuado para la hora del baño.

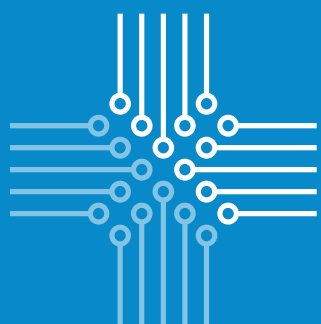

Medical Tec