

Pasos para armar la silla de ducha con respaldo y apoyabrazo

1

- Verifica que tengas todas las piezas y los 9 pernos necesarios para armar la silla.



Requiere llave allen **incluida**




Requiere destornillador phlips **no incluido**



- Identifica la base del asiento y coloca las patas en forma de cruz.

-Encuentra el perno más largo para unir la base del asiento con las patas.

2

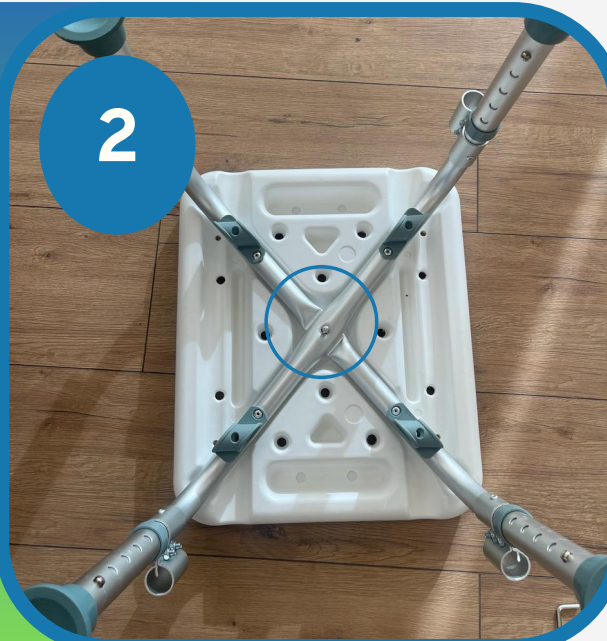

3

-Coloca los 4 pernos en las uniones de las patas y la base del asiento.



-Identifica el respaldo, las piezas de apoyo y los 4 pernos con argollas.

-Fija el respaldo a las piezas de apoyo con los pernos.

4

Piezas de apoyo



5

-Une el respaldo y la base del asiento utilizando los clics de fijación.

Clics de fijación



-Por último, coloca los dos apoyabrazo en cada lateral del asiento utilizando los clics de fijación.

Apoyabrazos

Clics de fijación

